

# Filterwechsel - Absauggerät / Filter Change - Suction Unit

1. Netzstecker ziehen!
2. Nach lösen der 4 Schrauben (Nr.1 ) kann das Schutzgitter und der Vorfilter herausgenommen werden.



Der Vorfilter sollte je nach Verschmutzung gereinigt werden.

3. Nach lösen der 4 Schrauben (Nr. 2 ) kann die Filterkassette gewechselt werden.

Die Filterkassette sollte nach ca. 50 Betriebsstunden gewechselt werden.

1. Pull off mains plug.
2. After releasing the 4 screws (No.1) the protective grating and the preliminary filter can be removed.  
  
The preliminary filter should be cleaned depending on the level of contamination.
3. After releasing the 4 screws (No.2) the filter cartridge can be changed.

The filter cartridge should be changed after about 50 hours of operation.

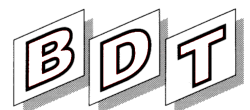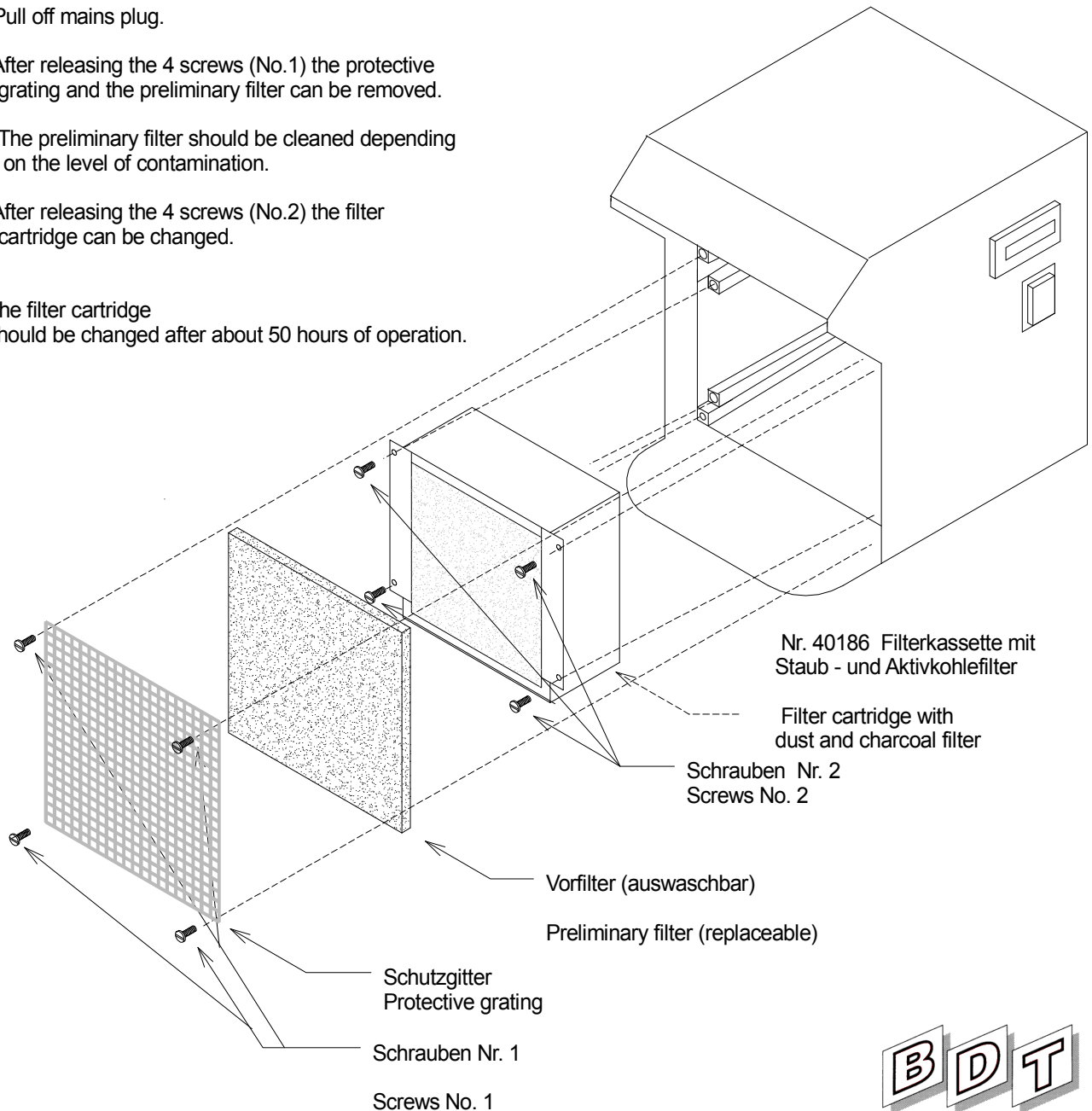

BDT GmbH  
77656 Offenburg  
Industriestrasse 27  
Tel 0781/58688  
Tax 0781/58664

