
Filterwechsel - Absauggerät / Filter Change - Suction Unit

- 1. Netzstecker ziehen!
- 2. Nach lösen der 4 Schrauben (Nr.1) kann das Schutzgitter und der Vorfilter herausgenommen werden.

Der Vorfilter sollte je nach Verschmutzung gereinigt werden.

3. Nach lösen der 4 Schrauben (Nr. 2) kann die Filterkassette gewechselt werden.

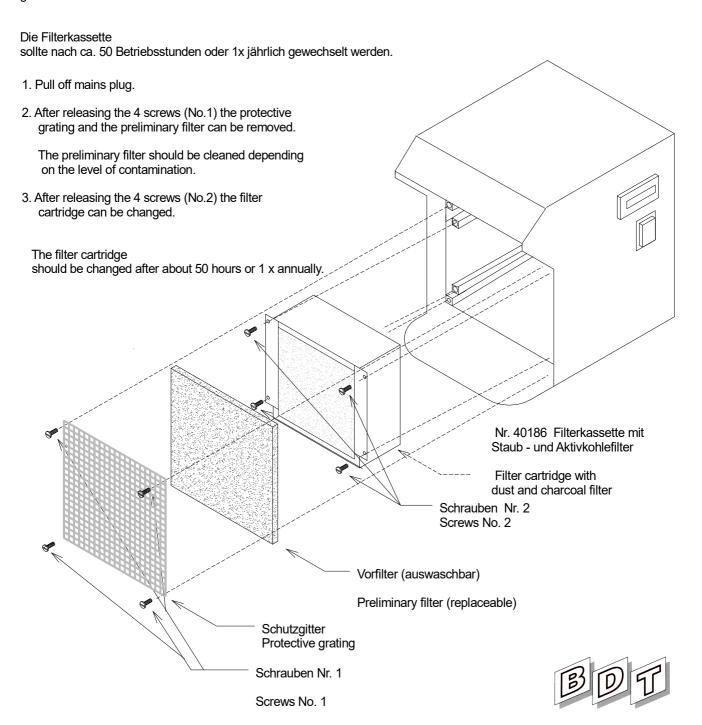



BDT GmbH Sonnhalde 1 77749 Hohberg Tel +49 7808 914 996-0 Tax +49 7808 914 996-99